

## NOTA TÉCNICA 4.15

### Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando Prótese Total marcada e um Registro de Mordida em Silicona / Complemento das N.T. 2.15 e 3.15

Passo 1a:




Indicado para casos totais onde o paciente está com prótese total marcada e também um **registro oclusal em silicona**.

Passo 1b:



Quando presente, este registro **evita que a prótese seja deslocada do rebordo** quando o paciente ocluir durante o exame. (N.T. 6.14)

Passo 2a:

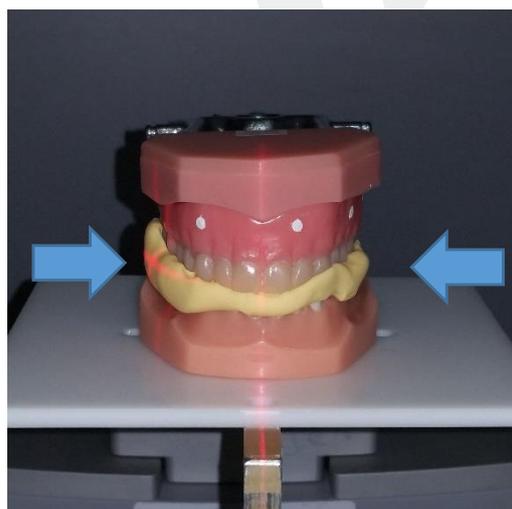

Posicione o paciente no tomógrafo para que fique centralizado no sentido **latero-lateral**. Para que todo o arco seja incluído na TC.




Passo 2b:



Centralize também no sentido **ântero-posterior**, com a linha da oclusão paralela ao Tomógrafo.

### NOTA TÉCNICA 4.15

#### Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando Prótese Total marcada e um Registro de Mordida em Silicona / Complemento das N.T. 2.15 e 3.15
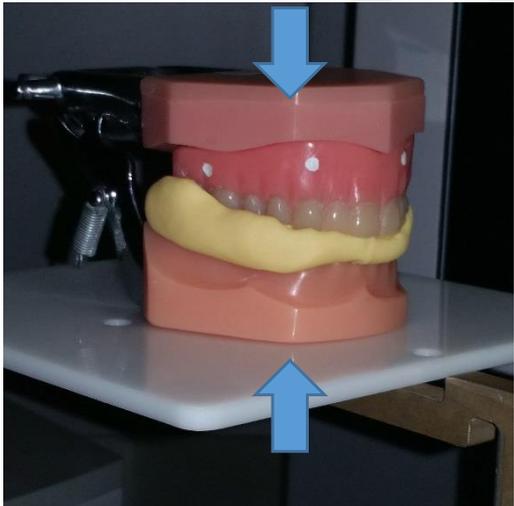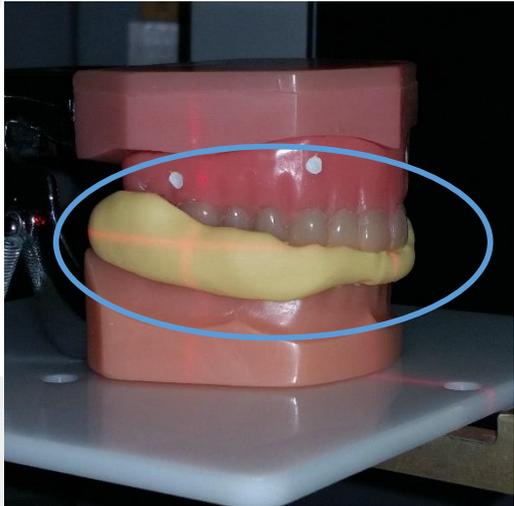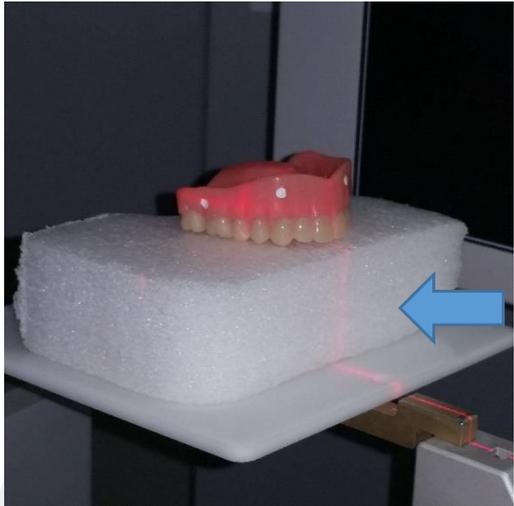
<p>Passo 2c:</p>  <p>Centralize o arco do paciente <b>verticalmente</b> para maximizar a altura da anatomia incluída na TC.</p>	<p>Passo 2d:</p>  <p>O Paciente deverá realizar o exame em <b>oclusão utilizando o registro</b>, para que a prótese fique bem adaptada no rebordo.</p>
<p>Passo 3:</p>  <p>Realize a aquisição da imagem seguindo o protocolo do seu tomógrafo. Em seguida grave as imagens <b>axiais</b> em formato DICOM.</p>	<p>Passo 4a:</p>  <p>Coloque a <b>prótese</b> no aparelho, use uma base de isopor para ajudar na posição e <b>evitar os artefatos</b> da estrutura do tomógrafo</p>

## NOTA TÉCNICA 4.15


### Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando Prótese Total marcada e um Registro de Mordida em Silicona / Complemento das N.T. 2.15 e 3.15

Passo 4b:




Não faça a TC da prótese junto com o registro, pois isso causaria uma fusão dos dois corpos na imagem, obstruindo a visão dos dentes.

Passo 4c:

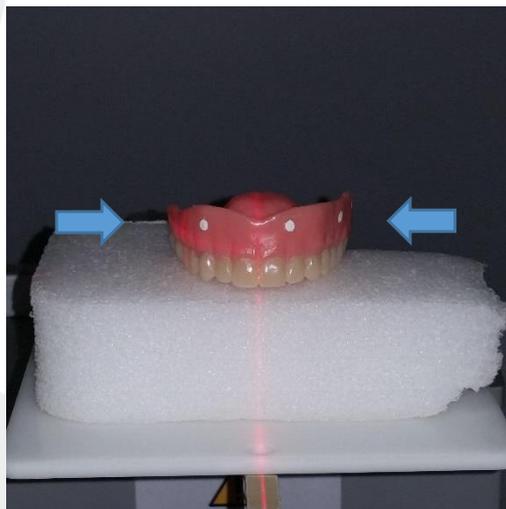


Posicione a **prótese** no tomógrafo para que fique centralizado no sentido **lâtero-lateral**. Para que toda a prótese seja incluída na TC.

Passo 4d:

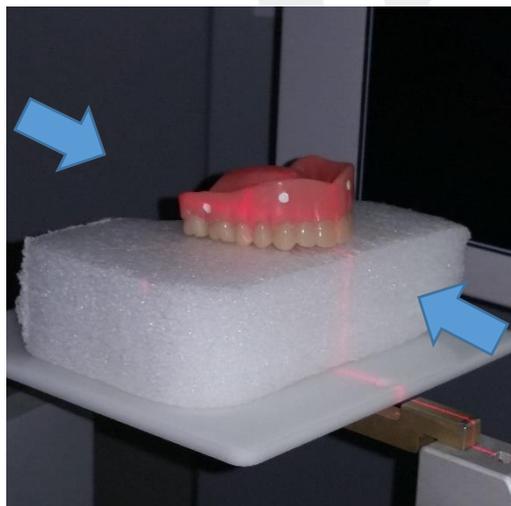

Centralize também no sentido **ântero posterior**, com os dentes da prótese paralelos à base do Tomógrafo.

Passo 4e:

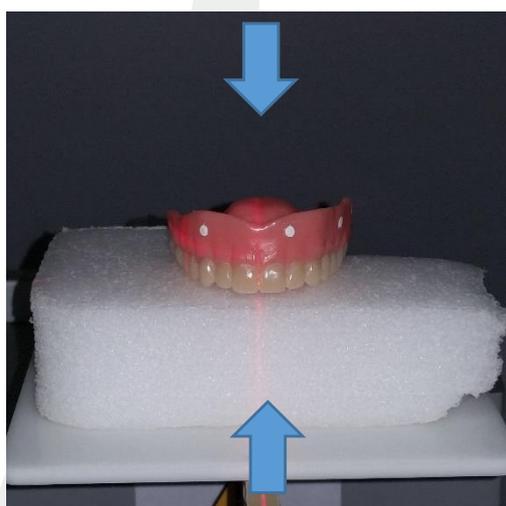


Centralize **verticalmente** para incluir toda a **prótese** na TC.

## NOTA TÉCNICA 4.15

### Realização do Exame Tomográfico conceito Bioparts Implantes Totais – Paciente portando Prótese Total marcada e um Registro de Mordida em Silicona / Complemento das N.T. 2.15 e 3.15

Passo 5:

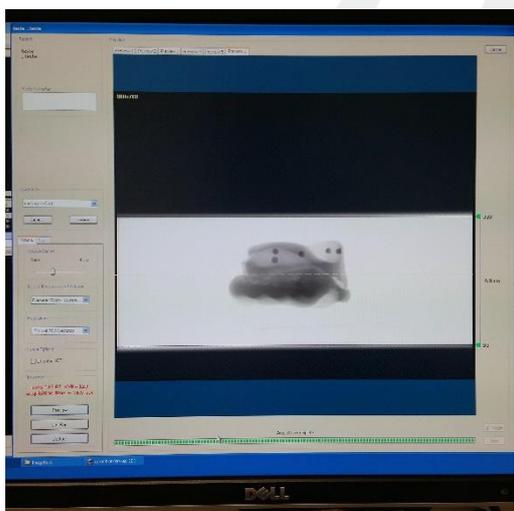

Realize a aquisição da imagem seguindo o protocolo do seu tomógrafo. Em seguida grave as imagens **axiais** em formato DICOM.

Versão 1.0  
Página 4/4